

DEN BODYGUARD2 AUFLADEN

1. Entfernen Sie das Kabel vom Gerät, indem Sie vorsichtig am Verbindungsstück ziehen und damit den USB-Stecker freilegen.
2. Verbinden Sie das Gerät mit dem USB-Port ihres Computers, um den Bodyguard2 zu laden.
3. Das Blinken der gelben LED signalisiert, dass das Gerät geladen wird. Wenn die gelbe LED konstant leuchtet, ist der Ladevorgang beendet – dies kann zwischen 1-2 Stunden dauern.
4. Stecken Sie das Kabel wieder an den Bodyguard2. Stellen Sie sicher, dass das Kabel richtigerum angesteckt wird – das Verbindungsstück sollte fest auf dem Gerät sitzen und die Aufkleber sollten auf derselben Seite sein.

